



REVIDERM
skin care system

specialistul în microdermabraziune



Calitatea și designul piesei manuale trebuie să asigure confortul operatorului și precizia în timpul utilizării. Capetele de tratament de calitate sunt cele de unică folosință (plastic transparent) sau cele metalice. De evitat capetele de sticlă, ușor erodate de fluxul de cristale (ceea ce lărgeste aria de

accelerare și scade eficiența vacuumului). Tuburile (circuitul pentru cristale) trebuie să fie îmbinate solid cu mașina, pentru a evita pierderile de presiune. Mașinile adevărate au containere de unică



folosință. Acestea sunt atașate ermetic la mașină și aruncate (închise) după folosire. Mașinile având containere înglobate în construcție, care se alimentează și se golesc manual, sunt depășite tehnic și nu asigură standardele de igienă. Calitatea cristalelor este esențială. Obținerea unor cristale de calitate superioară este o adevărată provocare tehnică. De urmărit uniformitatea cristalelor în ce



privește dimensiunea și forma (sunt preferate cristalele sferice). Cristalele de calitate superioară conțin peste 99% oxid de aluminiu, fără contaminare cu siliciu. Sunt câteva caracteristici adționale de analizat: dimensiunile mașinii, designul, zgomotul și vibrațiile pe care le produce, detalii care atrag sau sperie clienții și fac viața profesionistului ușoară (sau grea). De verificat garanția (cât de viabilă este mașina), țara de origine și reputația producătorului, calitatea și calificările personalului care asigură instruirea și suportul educațional și, în final, de comparat rezultatele obținute de diferite mașini. Nu sunt identice. Ultimul lucru care trebuie să vă preocupe este prețul aparatului. O mașină bună își scoate investiția inițială în timp scurt. O mașină proastă vă scoate din afaceri sau, în cel mai fericit caz, numai din sărite.



Vă propunem un sistem complet de îngrijire a pielii:

Aparate de microdermabraziune de ultimă generație

Produse dermato-cosmetice special dezvoltate în jurul conceptului de microdermabraziune (pregătirea pielii pentru microdermabraziune și regenerarea ei după procedură)

Gamă largă de tratamente dermato-cosmetice adaptate nevoilor individuale ale fiecărui pacient

Suport educațional permanent (programe periodice de seminarii și demonstrații practice)



Distribuitor unic:
eurobeauty DERMALINE S.R.L
str Biharia 67-77, sect 1, București
tel: 021/ 311.70.94
mobil: 0728 083 256
e-mail: mariana.tent@eurobeauty.ro
www.eurobeauty.ro

Mariana Tent, dermatolog